

NeilMed® ClearCanal®

Ušní maz je důležitý v prevenci nečistoty a bakterií způsobujících problémy se sluchem. Pokud je ho však přebytek, je třeba vosk změkčit a z ucha vypláchnout.

Obsah balení:

- **ClearCanal® kapky, obsah 15ml** (Karbamid peroxid 6,5 %, glycerin, oxyquinolin).
- **ClearCanal® sprej o obsahu 177 ml** (Čištěná voda, chlorid sodný (9mg/ml), hydrogenuhličitán sodný (0,5 až 1,0 mg/ml) k neutralizaci pH. Neobsahuje konzervační látky.
- Ušní špunty, drenážní sběrný pohárek, promývací balónek, čistič uší.

Návod k použití

Pouze pro použití v uchu u dospělých a dětí starších 12 let. Pokud chcete používat u dětí mladších 12 let, zkonzultujte s lékařem.

Způsob užití

1. Nakloňte hlavu na stranu a zmáčknutím plastové lahvičky kápněte 10 kapek do každého zvukovodu. Špička aplikátoru se nesmí dostat do zvukovodu.
2. Kapky nechte v uchu působit po dobu 10 minut – držte hlavu nakloněnou nebo použijte špunty do uší. Je běžné, že budete v uchu pociťovat teplo.
3. Odstraňte z uší špunty. Nasadte na sprej speciální plastovou nádobku, která zachycuje tekutinu odkapávající z vašich uší a oplachujte ucho pomocí spreje NeilMed® ClearCanal® po dobu 10 sekund nebo tak dlouho jak je třeba k důkladnému promytí. Mírně nakloňte hlavu ze strany na stranu abyste se zbavili přebytečné tekutiny a vysušte uši čistým, suchým ručníkem. Ve výjimečných případech můžete pociťovat v uších tlak. Pokud se to přihodí, ukončete promývání. Pokud tyto příznaky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem

Někteří uživatelé preferují pro promývání uší speciální balónek, který je rovněž součástí balení. Balónek je navržen tak, aby od něho šla promývací špička snadno oddělit a balónek se tak dal snadno omýt. Doporučuje se používat pouze teplou čistou vodu o tělesné teplotě 37 °C. Všechny části promývacího balónku mohou být čištěny mýdlem a teplou vodou, následně pak desinfikovány ponořením do vroucí vody po dobu 5 minut.

Přípravek používejte maximálně dvakrát týdně, případně podle doporučení lékaře.

Upozornění

Nepoužívejte:

- Pokud jste alergičtí na karbamid peroxid nebo jiné látky, které jsou součástí lahvičky.
- Pokud máte drenáž nebo výtok z ucha, bolest v uchu, podráždění či vyrážku, pokud trpíte závratí.
- Máte jakékoliv poranění, perforaci bubínku, pokud jste po operaci ucha (nedoporučil-li váš lékař jinak).

Při používání produktu:

- Vyhněte se kontaktu s očima. Pokud ke kontaktu dojde, oči vypláchněte a kontaktujte lékaře.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Dojde-li ke spolknutí, kontaktujte lékaře.
- Přípravek nesdílejte s jinými osobami.

Přípravek by neměl být používán při následujících situacích:

- U dětí do 12 let věku.
- Po operaci uší.
- Při infekci uší.
- Při současné nebo nedávné perforaci ušního bubínku.

Další informace:

- Obsah je pod tlakem; nepropichujte ani nespalujte.
- Skladujte mimo sluneční záření, mimo dosah zdrojů tepla, nenechte přípravek zmraznout.
- Skladujte při teplotě mezi 15-30 °C. Během transportu může být přípravek krátkodobě vystaven teplotě až 55 °C.
- Pokud přípravek nepoužíváte, umístěte na trysku plastový uzávěr.

Dovozce: OPA Group s.r.o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, Tel.: +420 233 313 578,
www.opagroup.cz

Výrobce: NeilMed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BLVD, Santa Rosa, CA 95403 USA,
www.neilmed.com