

OCULOCIN PROPO

Písemná informace pro uživatele. Sterilní oční kapky 5ml. 10 jedno dávkových lahviček po 0,5ml. Zdravotnický prostředek. Úleva a osvěžení pro podrážděné oči.

Indikace

Oční kapky pro podrážděné a unavené oči zabezpečující hygienu a hydrataci očí vystavených dennímu působení externích faktorů.

Složení

Čištěná voda, glycerin, extrakt z aloe vera, extrakt z heřmánku, extrakt z propolisu, chlorid sodný, borová voda, tetraboritan sodný, disodium EDTA.

Dávkování a způsob podání

Aplikujte 1-2 kapky do každého oka. Uzavíratelná lahvička slouží pouze pro jednorázové použití. Lahvičku vyhodte 24 hodin po otevření. Je bezpečné používat kapky tak často, jak je zapotřebí. Nekapejte přímo na kontaktní čočky. S nasazením kontaktních čoček počkejte nejméně 10 minut po použití kapek.

Upozornění

Nedotýkejte se kapátka lahvičky. Předejte tak kontaminaci. Nepolykejte roztok a uchovávejte kapky mimo dosah dětí. Nepoužívejte kapky, pokud jste alergičtí na jakoukoliv složku roztoku. Uchovávejte při teplotě do 30° C. Nemrazte. Nepoužívejte kapky, pokud jsou v roztoku viditelné kousky. Nepoužívejte kapky, pokud je lahvička poškozena, nebo roztok z lahvičky vytéká. Nepoužívejte kapky po datu expirace, které je uvedeno na obalu a na lahvičce (EXP). Datum expirace odpovídá poslednímu dnu v měsíci. V případě podráždění konzultujte užívání kapek s lékařem. Používejte kapky dle informací z příbalového letáku, nebo kapky užívejte dle doporučení lékaře, či lékárníka.

Výrobce: UAB ORIGMED, Raguvos st.5, Kaunas, LT-44275 Litva, Tel./Fax +370 37 334655, www.origmed.com

Distributor: OPA Group s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, Česká Republika, Tel.: +420 230 234 180, www.opagroup.cz.

www.oculocin.cz



OCULOCIN PROPO

Sterilné očné kvapky 5 ml. 10 jednodávkových ampuliek po 0,5 ml. Zdravotnícka pomôcka. Úľava a osvieženie pre podráždené oči.

Indikácie

Očné kvapky pre podráždené a unavené oči zabezpečujúce hygienu a hydratáciu očí vystavených dennému pôsobeniu externých faktorov.

Zloženie

Čistá voda, glycerín, extrakt z aloe vera, extrakt z harmančeka, extrakt z propolisu, chlorid sodný, kyselina boritá (bórová voda), tetraboritan sodný, disodium EDTA.

Dávkovanie a spôsob podávania

Aplikujte 1-2 kvapky do každého oka. Uzatvárateľná liekovka slúži len na jednorazové použitie. Liekovku vyhodte 24 hodín po otvorení.

Je bezpečné používať kvapky tak často, ako je to potrebné.

Nekvapajte priamo na kontaktné šošovky. S nasadením kontaktných šošoviek počkajte minimálne 10 minút po použití kvapiek.

Upozornenia

Nedotýkajte sa kvapkadla liekovky. Predídete tak kontaminácii. Nepreháťajte roztok a uchovávajte kvapky mimo dosahu detí. Nepoužívajte kvapky, ak ste alergický na akúkoľvek zložku roztoku. Neskladujte pri teplote vyššej

ako 30 °C. Nezmrazujte. Nepoužívajte kvapky, ak sú v roztoku viditeľné kúsky.

Nepoužívajte kvapky, ak je liekovka poškodená alebo roztok z liekovky vyteká. Nepoužívajte po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale a na liekovke. Dátum expirácie zodpovedá poslednému dňu v mesiaci. V prípade podráždenia konzultujte používanie kvapiek s lekárom. Používajte kvapky podľa návodu na používanie alebo kvapky používajte podľa odporúčania lekára alebo lekárnika.

Výrobca: UAB ORIGMED, Raguvos st.5, Kaunas, LT-44275 Litva, Tel./Fax +370 37 334655, www.origmed.com

Distribútor: OPA Group s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, Česká Republika, Tel.: +420 230 234 180, www.opagroup.cz.

www.oculocin.cz

