

# NasoGEL sprej NeilMed

## zvlhčuje a zklidňuje suchý nos

Přečtěte si před prvním použitím pozorně tento návod na použití. V případě dalších otázek se obraťte na svého lékaře, nebo lékárníka. NasoGel umožňuje zvlhčení a zklidnění suchých nosních průchodů.

### Suchost může být způsobena:

- vnitřním vytápěním
- klimatizací
- cestou v letadle
- vysokou nadmořskou výškou
- používáním kyslíku

Doporučuje se používat i při post radiační terapii a po operaci dutin. Suchost nosní sliznice může vést až ke krvácení z nosu, změnám vnímání vůní a chuti, bolestem hlavy, infekcím nosu a celkovému pocitu nepohodlí. NasoGel Sprej je velmi snadné používat, jelikož obsahuje praktický rozprašovač gelu.

### Návod na použití NasoGel sprej NeilMed

1. sundejte víčko z rozprašovače
2. odstraňte modrou bezpečnostní sponu
  - a) zmáčkněte pumpičku dvěma prsty a držte ji v dolní pozici po dobu 4 sekund
  - b) povolte pumpičku
  - c) zopakujte kroky a) a b) 4x až 5x, dokud nevystříkne gel
3. **DŮLEŽITÉ:** musíte zmáčknout a držet pumpičku v dolní pozici po celé 4 vteřiny, protože jen tak bude mít pumpička tu správnou výkonnost!
4. po naplnění pumpičky je Gel připraven k rozprašování
5. aplikujte 2 - 4 dávky NasoGel spreje do každé nosní dírky každých 4 - 6 hodin (v případě přetrvávající suchosti můžete aplikovat gel častěji, nebo navštívit svého lékaře)
6. umístěte zpět víčko i bezpečnostní sponu abyste zamezili vysychání přípravku (pumpička zůstane připravena k užití několik dnů, jakmile však dojde ke ztrátě tlaku, je znovu třeba ji připravit k dalšímu užití viz 3. krok)

### Obsah balení

1x lahev 45 ml - Hyaluronát sodný, aloe vera, allantoin, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, glycerin, propylenglykol, USP tř. čišťená voda, Benzalkonium chlorid je přidán jako konzervační látka.

### Varování

Chraňte před dětmi. Skladujte na suchém, studeném místě, chraňte před zmraznutím. Používejte tak, jak je doporučeno výše. Nepoužívejte při pocitu suchosti v ústech. Nepoužívejte, pokud byl obal při koupi porušen. Nepoužívejte přípravek, pokud jste alergičtí na některou látku obsaženou v přípravku (viz obsah).

Distributor pro ČR: OPA Group s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, Česká republika, Tel.: +420 230 234 180, [www.opagroup.cz](http://www.opagroup.cz)

Výrobce: NeilMed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BLVD, Santa Rosa, CA 95403 USA

EC REP

MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175, Hannover, Germany



# NasoGEL sprej NeilMed

zvlhčuje a upokojuje suchý nos

Prosím přečítajte si varovanie pred prvým použitím. NasoGEL umožňuje zvlhčenie a upokojenie suchých nosových priechodov. Zdravotnícky prostriedok.

## Suchosť môže byť spôsobená

- vnútorným vykurovaním
- klimatizáciou
- cestou v lietadle
- vysokou nadmorskou výškou
- používaním kyslíka

Odporúča sa používať aj pri post rádioterapii a po operácii dutín. Suchosť nosovej sliznice môže viesť až ku krvácaniu z nosa, zmenám vnímania vône a chuti, bolestiam hlavy, infekciám nosa a celkovému pocitu nepohodlia. NasoGEL sprej sa veľmi ľahko používa, pretože obsahuje praktický rozprašovač gélu.

## Návod na použitie NasoGEL sprej NeilMed

1. zložte viečko z rozprašovača
2. odstráňte modrú bezpečnostnú sponu
  - a) stlačte pumpičku dvomi prstami a držte ju v dolnej pozícii po dobu 4 sekúnd
  - b) povoľte pumpičku
  - c) zopakujte kroky a) a b) 4x až 5x, kým nevystrekne gél
3. **DÔLEŽITÉ:** musíte stlačiť a držať pumpičku v dolnej pozícii po celú dobu 4 sekúnd, pretože len tak bude mať pumpička tú správnu výkonnosť!
4. po naplnení pumpičky je Gél pripravený na rozprašovanie
5. aplikujte 2 - 4 dávky NasoGEL spreja do každej nosovej dierky každých 4 - 6 hodín v prípade pretrvávajúcej suchosti môžete aplikovať gél častejšie, alebo navštíviť svojho lekára
6. umiestnite späť viečko i bezpečnostnú sponu ,aby ste zamedzili vysychaniu prípravku (pumpička zostane pripravená na použitie niekoľko dní, ako náhle však dôjde k strate tlaku, je znova potrebné ju pripraviť na ďalšie použitie (viz krok 3.)

## Obsah balenia


- 1x fľaša 30 ml - Hyaluronát sodný, aloe vera, alantoin, chlorid sodný, hydrogénuhličen sodný, glycerín, propylén-glykol, USP tr. čistená voda., Benzalkóniumchlorid je pridaný ako konzervačná látka.

## Varovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na suchom, studenom mieste, chráňte pred mrazom. Používajte tak, ako sa odporúča vyššie. Nepoužívajte pri pocite suchosti v ústach. Nepoužívajte, ak bol obal pri kúpe porušený. Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na niektorú látku obsiahnutú v prípravku (pozri obsah).

Distribútor pre SR: OPA Group s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, Česká republika, Tel.: +420 230 234 180, [www.opagroup.cz](http://www.opagroup.cz)

Výrobca: NeilMed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BLVD, Santa Rosa, CA 95403 USA

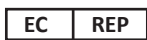

MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175, Hannover, Germany

