

NeilMed Piercing Aftercare

Přední přírodní, veganská a sterilní péče o piercing ve fyziologickém roztoku bez konzervačních látek pro léčbu drobných zranění a piercingu.

NeilMed Piercing Aftercare umožňuje uživatelům nastříkat fyziologický roztok přímo na piercing, místo aby piercing namáčeli ve fyziologické lázni nebo museli používat vatový tampon. **Aplikace je tím pádem sterilnější** a nabízí čistší řešení, které usnadňuje čištění povrchových piercingů, jako jsou např. piercingy chrupavek. Nicméně pokud je vám to příjemnější, lze sterilní roztok nastříkat na vatovou tyčinku či tampón.

Fyziologický roztok bez přidaných konzervačních látek pomáhá optimálnímu hojení ran, neriskujete s ním případné přílišné vysušení či popálení, ke kterému může dojít při přípravě vlastních solných roztoků. Přípravek se velmi snadno používá. Sprej stříká v jakékoli poloze, včetně polohy dnem vzhůru a dostane se opravdu všude.

Neštípe. Nepálí. Přenosný, vhodný na cesty nebo na cestách

Obsah balení:

- 1x láhev o objemu 75 ml (2.7 oz).
- Sterilní fyziologický roztok, bez léčiv a konzervačních látek.
- Český návod.

Pokyny pro použití Piercing Aftercare

- Před použitím krátce stříkněte přípravek NeilCleanse Piercing Aftercare do vzduchu nebo na neporušenou pokožku, abyste otestovali proud a vyčistili trysku.
- Pro dávkování namiřte trysku na postižené místo a stříkejte ze vzdálenosti 5 až 10 cm nebo podle toho, jak je vám to pohodlné.
- Po každém použití zakryjte sprej průhledným uzávěrem.

Upozornění

- Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.
- Nepoužívejte na popáleniny. Nepoužívejte do tělesných otvorů, ušních kanálků, očí nebo úst.
- Není určeno k injekční aplikaci.
- Pouze pro individuální použití.

- Aplikujte podle potřeby. Pro další péči o rány a pro použití u dětí mladších 2 let se poraďte se zdravotnickým pracovníkem.
- Obsah pod tlakem; nepropichujte ani nespalujte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte při teplotě mezi 15 – 30 °C.
- Během transportu může být přípravek krátkodobě vystaven teplotě až 55 °C.
- Skladujte mimo sluneční záření, mimo dosah zdrojů tepla, nenechte přípravek zmrznout.
- Pokud na místě vpichu přetrvává zarudnutí, otok, nebo bolest, vyhledejte zdravotnickou pomoc.

Dovozce: OPA Group s.r.o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, Tel.: +420 233 313 578,
www.opagroup.cz

Výrobce: NeilMed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BLVD, Santa Rosa, CA
95403 USA, www.neilmed.com